


HOSPRO

รถเข็นพยางค์เดิน
รุ่น H-RT965LH-1

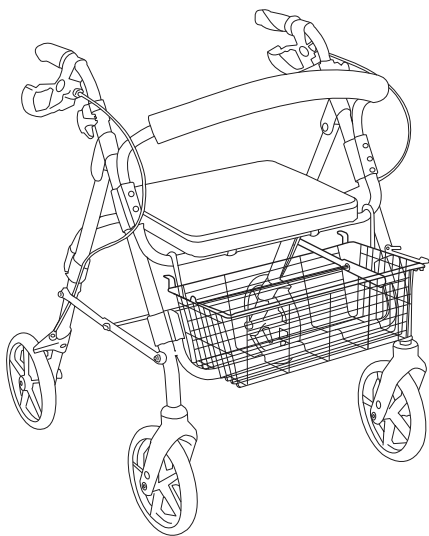

รถเข็นพยางค์เดิน

ทำความเข้าใจกับสินค้าของคุณ

เครื่องโรลเลอร์ รุ่น H-RT965LH-1 เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาในการเดิน ช่วยให้เดินสะดวก คล่องตัว ใช้งานได้ทุกที่

- โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ทนทาน พับได้ ใช้งานง่าย
- ด้ามจับทำจากพลาสติก จับถนัดมือ พร้อมเบรกมือ
- เบาะนั่งบุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมพีวีซี

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเข็นพยุงเดิน ควรปฏิบัติตามคำเตือน และคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด


คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำ ในคู่มือเล่มนี้ก่อน หากมีข้อสงสัยในคำเตือน ข้อควรระวัง หรือคำแนะนำ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคลากรด้านเทคนิคก่อนใช้งาน มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้
- โปรดปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ภายภาพบำบัด หรืออาชีพบำบัด เกี่ยวกับการปรับความสูงของรถเข็นพยุงเดิน เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
- รถเข็นพยุงเดิน ใช้สำหรับพยุงเดินเท่านั้น ห้ามใช้เป็นเก้าอี้รถเข็น สำหรับผู้ป่วย
- ห้ามดันรถเข็นพยุงเดินขณะมีคนนั่ง
- ห้ามขับเคลื่อนรถเข็นพยุงเดินขณะนั่ง เพราะอาจเกิดความเสียหายของ โครงอลูมิเนียม หรือล้อได้
- ห้ามใช้เบาะนั่งในการขนย้าย คน หรือสิ่งของใดๆ
- ห้ามนั่งบนรถเข็นพยุงเดินขณะถูกเก็บอยู่บนยานพาหนะ
- ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน 100 กก. มิฉะนั้นอาจเกิดอันตราย

- ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง โปรดตรวจสอบโครงค้ำยันด้านล่างของรถเข็นพยุงเดิน ว่าถูกกางออกอย่างถูกต้องและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เบรก และชิ้นส่วนรถเข็นพยุงเดินนั้น อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- ล้อทุกล้อของรถเข็นพยุงเดินต้องสัมผัสกับพื้นตลอดเวลาที่ใช้งาน
- ห้ามแขวนสิ่งของใดๆ ตรงที่จับและโครงค้ำยัน(ให้ใส่ไว้ในตระกร้าที่มีอยู่) ที่ซึ่งอาจทำให้รถเข็นพยุงเดินพลิกคว่ำ เกิดความเสียหาย และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ใช้งานได้
- ที่นั่งต้องถูกพับเก็บ ขณะใช้งานการเหลือผู้ป่วยนอกห้ามใช้งานที่นั่งโดยไม่มีพนักพิงหลัง เพราะอาจทำให้ผู้ใช้งานตกจากรถเข็นพยุงเดิน ขณะเอนหลัง หรือเลื่อนตัวได้
- เบรกต้องอยู่ในตำแหน่งล็อกก่อนการใช้งาน
- กรณีใช้รถเข็นพยุงเดินขณะทรงตัวอยู่กับที่ ต้องล็อกเบรกมือทุกครั้ง
- ห้ามนั่งบนรถเข็นพยุงเดิน ขณะอยู่บนทางลาดเอียง
- ห้ามใช้งานรถเข็นพยุงเดินเพื่อเดินถอยหลัง ลงทางลาดเอียง หรือเพื่อปีนบันได ขอบถนน ข้ามสิ่งกีดขวาง เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บสาหัส จากการหกหล่นได้
- ห้ามทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ขณะที่รถเข็นพยุงเดินกำลังใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์เสริม หรืออะไหล่ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับรถเข็นพยุงเดินรุ่นนี้เท่านั้น

รถเข็นพยุงเดิน

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

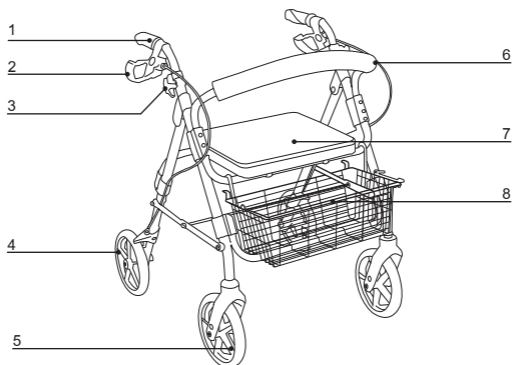

1. มือจับพลาสติก

2. เบรคมือ

3. ที่หมุนปรับระดับ

 ความสูงของมือจับ

4. ล้อหลัง

5. ล้อหน้า

6. พนักพิง

7. ที่นั่ง

8. ตะกร้า

รถเข็นพยุงเดิน

การเริ่มต้นใช้งาน / การพับเก็บ รถเข็นพยุงเดิน

การเริ่มต้นใช้งาน

จับแฮนด์บาร์หนึ่งอันแล้วกดเบาะนั่งจนกระทั่งล้อทั้งสี่ยื่นออกมา และกดเบาะนั่งให้ราบ ก่อนใช้งานรถเข็นพยุงเดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อทั้งสี่สัมผัสกับพื้น และอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง


การพับเก็บ

- เพื่อประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ โปรดนำตระกร้าออก
- ดึงสายรัดใต้เบาะ จนกระทั่งรถเข็นพยุงเดินพับเข้าหากัน



การปรับตำแหน่งของมือจับ

- ในการกำหนดความสูงที่เหมาะสม ให้ยึนหลังรถเข็นพยุงเดินนี้ โดยให้ไหล่ผ่อนคลาย ทางแขนออกข้างลำตัว และมองตรงไปข้างหน้า เมื่อยึนในตำแหน่งนี้ ควรปรับด้ามจับของรถเข็นพยุงเดินให้อยู่ในระดับความสูงที่เท่ากับข้อมือ
- ขั้นตอนนี้จะจัดตำแหน่งแขนให้งอเมื่อใช้รถเข็นพยุงเดิน
- ในการปรับความสูงของแฮนด์บาร์ ให้ถอดน็อตที่แฮนด์ปรับความสูง และสกรูออกจากโครงค้ำยัน
- เลื่อนแฮนด์บาร์ในโครงค้ำยัน จนกระทั่งอยู่ในความสูงที่เหมาะสมในแฮนด์บาร์ และโครงค้ำยันต้องอยู่ในแนวเดียวกัน
- วางสกรูผ่านรูที่จัดตำแหน่งไว้บนแฮนด์จับ และรูในโครงค้ำยัน เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเพื่อรองรับหัวสกรู
- วางแหวนรองสกรูไว้เหนือสกรู จากนั้นขันให้แน่น

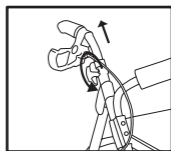

การตรวจสอบ / การปรับ / วิธีการใช้งาน เบรกมือ

- ก่อนใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า เบรกทำงานได้อย่างปกติ การดึงเบรกมือ จะล็อกล้อเพียงชั่วคราว การกดเบรกมือลง จะล็อกล้อได้แน่นขึ้น ในการปรับเบรก ให้ใช้ประแจขันน็อตขึ้นให้แน่น และในขั้นตอนนี้ควรวางสายเบรกไว้ที่ขาของรถขึ้นพยุงเดิน พร้อมตรวจสอบว่าสายเบรกส่วนเกินวนออกทางด้านหน้าของรถขึ้นพยุงเดินหรือไม่

 ข้อควรระวัง: หลังจากปรับเบรกแล้วต้องตรวจสอบเบรกก่อนใช้งานทุกครั้ง ดูได้ที่คำแนะนำการบำรุงรักษา

วิธีการใช้งานเบรก

- หากต้องการชะลอความเร็ว ให้บีบเบรกมือขึ้น
- หากต้องการล็อกเบรก ให้กดเบรกมือจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกเข้าที่ตำแหน่งล็อก หากปรับเบรกแล้ว แต่ล้อหลังของรถขึ้นพยุงเดินยังทำงานอยู่ ให้หยุดใช้งานทันที และติดต่อผู้แทนจำหน่ายร้านขายยา หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อส่งคืนหรือซ่อมแซม
- หากต้องการปลดล็อกเบรก ให้ดึงเบรกมือขึ้น

วิธีการเดินโดยใช้รถขึ้นพยุงเดิน

สำหรับตำแหน่งที่เหมาะสมและการใช้รถขึ้นพยุงเดินของคุณ ลองนึกภาพเส้นที่ลากผ่านด้านหลังของล้อหลัง ทำข้างหนึ่งควรวอยู่ข้างหน้าเส้นนั้นเล็กน้อยขณะเดิน

วิธีการใช้งานที่นั่ง

- คำเตือนด้านความปลอดภัย: ดูได้ที่คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัย
- ก่อนใช้งานที่นั่ง ต้องล็อกเบรกก่อนเสมอ
- ห้ามเลื่อนรถขึ้นพวงงัดขึ้นขณะนั่งบนเบาะนั่ง ขณะนั่งควรล็อกเบรกก่อนเสมอ หากไม่ล็อก อาจเสี่ยงต่อการหกหล่นและบาดเจ็บสาหัสได้
- ห้ามใช้งานที่นั่งโดยไม่มีพนักพิงหลัง เพราะอาจทำให้ผู้ใช้งานตกลงจากรถขึ้นพวงงัดขึ้น ขณะเอนหลัง หรือเลื่อนตัวได้
- ห้ามนั่งบนรถขึ้นพวงงัดขึ้น ขณะอยู่บนทางลาดเอียง หรือพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ
- ห้ามบรรจุทุกน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม
- อุปกรณ์รถขึ้นพวงงัดขึ้นนี้ ใช้สำหรับพวงงัดขึ้นเท่านั้น ห้ามใช้เป็นเก้าอี้รถขึ้นสำหรับผู้ป่วย

รถขึ้นพวงงัดขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	รถเข็นพยางเดิน
รุ่น	H-RT965LH-1
วัสดุ	อลูมิเนียม
สี	ดำ
ปรับความสูง สกรูและมือ	76.5-87.5 ซม.
ที่นั่ง	(D) 36 x (W) 32.5 ซม.
วัสดุเบาะนั่ง	เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียมพีวีซี
ล้อหน้า	8 นิ้ว
ล้อหลัง	8 นิ้ว
ขนาดพับ	(W)61 x (L)46 x (H)100 ซม.
ขนาดกาง	(W)61 x (L)76 x (H)84 ซม.
น้ำหนัก	7.4 กก.
รับน้ำหนักได้สูงสุด	100 กก.

รถเข็นพยางเดิน